



NOTICE D'UTILISATION

MASQUE «GRAND PUBLIC» FILTRATION SUPÉRIEURE À 90% - 10 LAVAGES - PETITE TAILLE
FILTRATION 93,8% - RESPIRABILITÉ 251 L.m-2.s-1

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est important de respecter cette notice d'utilisation

- Portez ce masque quand vous êtes **en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez**.
- Vérifiez toujours que le masque est **bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez**.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- **Ce masque ne remplace pas les gestes barrières** (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). **Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.**



COMMENT PORTER VOTRE MASQUE ?

Avant de le mettre :

- Avant de toucher votre masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
- Inspectez-le et assurez-vous que celui-ci ne comporte aucune dégradation (trous, déchirures...).
- Il est recommandé de porter son masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.
- N'apportez jamais aucune modification à votre masque.

Pour le mettre :

- Tenez votre masque par les lanières élastiques.
- Placez-le au niveau de votre nez et de votre bouche.
- Passez les lanières élastiques derrière les oreilles.
- Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton.

Lorsque vous le portez :

- Évitez de toucher votre masque et de le déplacer.
- Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

Il faut changer le masque :

- Quand vous l'avez porté pendant 4h.
- Quand vous souhaitez boire ou manger.
- Quand il devient difficile de respirer.
- Quand votre masque devient humide.
- Si votre masque est souillé, endommagé ou déformé.
- Si celui-ci ne tient plus correctement contre votre visage.

Pour l'enlever :

- Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
- Utilisez les lanières élastiques pour décoller le masque de votre visage.
- En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique.
- Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.

Pour terminer :

- Lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.

Coordonnées du fabricant :

Plim - 28 rue de la Béronne - 79500 MELLE
RCS Niort - SIRET 511 924 631 00035
Tél. +33 6 95 80 75 09
Site : <https://www.plim.fr>

Type de masque :

Masque Grand Public - Filtration Supérieure à 90% conforme aux recommandations du guide **AFNOR SPEC S76-001** du 27 mars (maj. le 27 avril 2020) de la **note d'information interministérielle** du 29 mars 2020 (maj. du 28 janvier 2021)

COMMENT ENTREtenir VOTRE MASQUE ?

Avant ouverture :

- Stockez votre masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil.

Pour le lavage :

- Lavez votre masque de préférence à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage comprenant **au moins un cycle de 30 min à 40°C minimum**. Vous pouvez laver votre masque avec votre linge.
- Après avoir touché votre masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique.
- Ce masque a été testé pour 10 lavages. **Après 10 lavages, sa filtration n'est plus garantie.**
- Lorsque la machine est terminée, sortez votre masque et reformez les plis sans forcer.

Après le lavage :

- Faites sécher votre masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches).
- Pour cela, vous pouvez : utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), un sèche-cheveux ou laisser sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté.
- Vous pouvez repasser votre masque à fer doux (thermostat positionné sur « synthétique »).
- Dès que celui-ci est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre et hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).



SÉCURITÉ

Ce masque a été testé selon le protocole d'essai décrit dans le document DGA du 25 mars 2020. Ses performances ont été mesurées par les laboratoires de la DGA, maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (rapport RP/20-2790/DGA MNRBC/2000305/NP du 9 avril 2020). Il en résulte **une efficacité de filtration de 93,8% pour des particules de 3 microns** émises par la personne qui le porte (supérieure au minimum requis de 90%) et **un niveau de respirabilité de 251 L.m-2.s-1** (supérieur au minimum requis de 96 L.m-2.s-1), ce qui permet de le porter pendant une durée de 4h.

AVERTISSEMENT

Ce masque «grand public» filtration supérieure à 90% est proposé dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19. Son port est une **mesure complémentaire de la stricte application des mesures de distanciation physique, du respect des gestes barrières et des mesures d'organisation du travail**. Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce masque, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation de celui-ci avec les caractéristiques du milieu d'usage. **Il convient donc de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.**

IMPORTANT : Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle (EPI) au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). Il ne doit pas être utilisé par les personnels soignants au contact des patients et est exclusivement réservé à des usages non sanitaires. Dans le milieu professionnel, son utilisation doit s'inscrire dans le cadre de la mise en œuvre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs (articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail). De la même façon, l'employeur doit s'assurer que la respirabilité effective du masque est compatible avec les particularités du poste de travail et en particulier l'effort fourni (R.4323-91 du Code du travail).

DÉCOMPTE DES UTILISATIONS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MASQUE 1										
MASQUE 2										
MASQUE 3										
MASQUE 4										
MASQUE 5										



Coordonnées du fabricant :

PliM - 28 rue de la Béronne - 79500 MELLE
RCS Niort - SIRET 511 924 631 00035
Tél. +33 6 95 80 75 09
Site : <https://www.plim.fr>

Type de masque :

Masque Grand Public - Filtration Supérieure à 90% conforme aux recommandations du guide **AFNOR SPEC S76-001** du 27 mars (maj. le 27 avril 2020) de la **note d'information interministérielle** du 29 mars 2020 (maj. du 28 janvier 2021)